

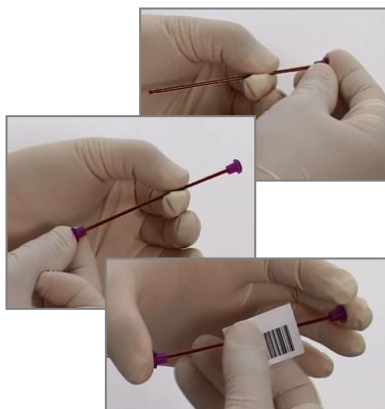





# Guide visuel pour le prélèvement capillaire

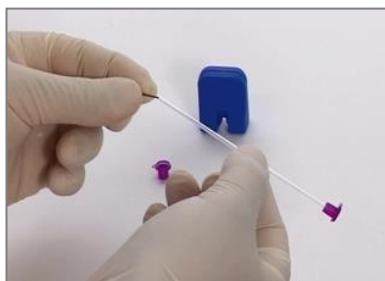

1. Avant de procéder au prélèvement, préparer l'ensemble du matériel nécessaire :
  - Le matériel de désinfection
  - Le capillaire conservé à l'obscurité pour éviter la dégradation de l'héparine pulvérisée
  - Les bouchons et la limaille d'agitation
  - L'aimant pour l'agitation
  - Le filtre à caillot qui doit être clairement localisé près de l'analyseur
2. Pré-positionner un bouchon sans le pousser à fond : il doit tenir mais sans empêcher l'air de circuler
3. Insérer la limaille avant le prélèvement : elle restera dans le tube grâce au bouchon
4. Procéder à la désinfection et l'incision selon les procédures en vigueur dans votre établissement
5. Essuyer la microgoutte formée puis tenir l'extrémité à prélever jusqu'à obtenir une belle goutte
6. Le capillaire doit être maintenu en position horizontale et légèrement vers le bas pour qu'il puisse se remplir lentement, **JAMAIS VERS LE HAUT**
7. Le contact avec la goutte doit être maintenu pour empêcher l'air de rentrer et le sang de tomber
8. Une fois le capillaire plein, sans bulle :
  - Fixer fermement le premier bouchon
  - Positionner fermement le second
  - Marquer sur le bouchon l'extrémité qui a été en contact avec la peau et donc les crèmes éventuellement présentes
  - Identifier le prélèvement
9. Se munir d'un aimant pour homogénéiser doucement le prélèvement. Sans ce geste, l'héparine ne se décollera pas des parois et l'homogénéité de l'échantillon ne sera pas suffisante

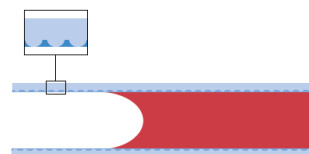

# Guide visuel pour la mesure sur capillaire

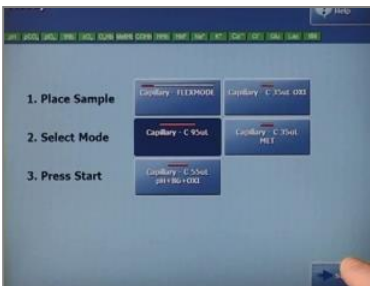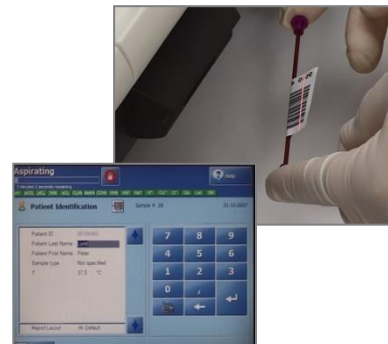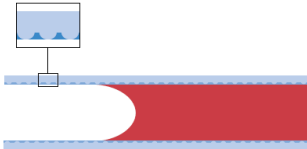

1. Se munir d'un aimant pour homogénéiser doucement le prélèvement. Sans ce geste, l'héparine ne se décollera pas des parois et l'homogénéité de l'échantillon ne sera pas suffisante



2. Identifier le prélèvement

3. Placer un filtre à caillot du côté opposé à celui qui a servi au prélèvement pour éviter aux crèmes éventuelles d'être aspirées. Le filtre doit assurer l'étanchéité entre l'analyseur et le capillaire : coté large vers le capillaire, côté étroit vers l'analyseur

Filtre à caillot

Vaseline

Agitateur



Extrémité d'aspiration

4. Avec l'aimant, déplacer la limaille à l'extrémité opposée au site d'aspiration et ôter le second bouchon

5. Lever le site d'introduction capillaire

6. Positionner fermement le capillaire sur l'analyseur

7. Lancer l'analyse

8. Fermer le site d'introduction